



PROCÉDURE D'INSTALLATION DES CONTENANTS PRÊTS À SUSPENDRE POUR L'ALIMENTATION ENTÉRALE

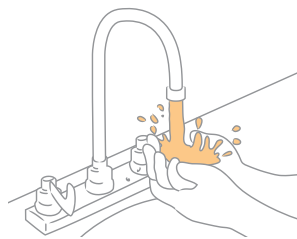

1. BIEN SE LAVER LES MAINS AVEC DE L'EAU ET DU SAVON AVANT DE MANIPULER LE CONTENANT OU LE DISPOSITIF D'ALIMENTATION.

IMPORTANT : Les mains sont une source importante de contamination microbienne. Le lavage des mains est l'une des meilleures façons de réduire le risque de contamination par contact et d'altération du produit.

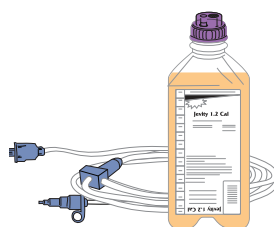

2. PRENDRE LE CONTENANT PRÊT À SUSPENDRE ET UN DISPOSITIF D'ALIMENTATION APPROPRIÉ (AVEC PERFORATEUR).

IMPORTANT : Le dispositif d'alimentation doit convenir à la pompe pour alimentation entérale utilisée.




3. NOTER LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES SUR L'ÉTIQUETTE DU CONTENANT (NOM DU PATIENT, NUMÉRO DE CHAMBRE, DATE, HEURE DE DÉBUT, DÉBIT). INSCRIRE AUSSI LA DATE ET L'HEURE DE DÉBUT SUR LE DISPOSITIF D'ALIMENTATION.

IMPORTANT : Il est essentiel de bien noter la date et les informations d'identification pour assurer la sécurité du patient.




4. TOURNER LE CONTENANT À L'ENVERS ET L'AGITER VIGOREUSEMENT PENDANT AU MOINS 10 SECONDES.

IMPORTANT : Bien agiter le contenant permet d'assurer une consistance uniforme et un écoulement adéquat du produit, particulièrement dans le cas des préparations visqueuses ou renfermant des fibres.

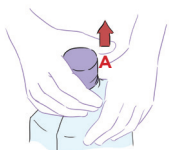


5. TENIR FERMEMENT LE CONTENANT PRÊT À SUSPENDRE ET RETIRER LE CAPUCHON DU BOUCHON AVEC VIS DE SÛRETÉ (A).

IMPORTANT : NE PAS retirer le bouchon avec vis de sûreté lui-même.

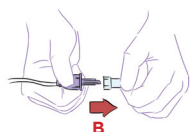

6. RETIRER LE CAPUCHON DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION (B).

IMPORTANT : NE toucher AUCUNE partie du dispositif d'alimentation qui entrera en contact avec la préparation.

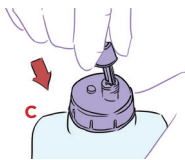

7. INSÉRER LE DISPOSITIF D'ALIMENTATION DANS L'ORIFICE DU BOUCHON AVEC VIS DE SÛRETÉ DU CONTENANT PRÊT À SUSPENDRE (C) ET APPUYER JUSQU'À CE QUE VOUS SENTIEZ QUE VOUS AVEZ PERFORÉ LA PELLICULE D'ALUMINIUM.



8. VISSER LE BOUCHON DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE (D) JUSQU'À CE QU'IL SOIT BIEN FIXÉ.

IMPORTANT : VISSER et SERRER le bouchon du dispositif d'alimentation pour prévenir les fuites et la contamination.

9. FERMER LA PINCE À ROULETTE SUR LE DISPOSITIF D'ALIMENTATION, RETOURNER LE CONTENANT PUIS LE SUSPENDRE PAR LA TIGE SE TROUVANT À SA BASE.

IMPORTANT : Le contenant doit être suspendu à l'envers pour permettre un écoulement adéquat du produit.

10. SUIVRE LE MODE D'EMPLOI ET LES DIRECTIVES D'AMORÇAGE DE LA POMPE.

IMPORTANT : Une installation adéquate est essentielle pour assurer un fonctionnement efficace et précis de la pompe.

11. JETER TOUT RESTE DE PRÉPARATION APRÈS 24 À 48 HEURES.

Les contenants prêts à suspendre préremplis pour l'alimentation entérale peuvent être suspendus en toute sécurité pendant un maximum de 48 heures, à condition que chaque nouveau contenant soit relié à un nouveau dispositif d'alimentation, selon une technique aseptique. Il sera plus facile d'éviter la contamination par contact en utilisant un seul dispositif d'alimentation par contenant. Si plus d'un dispositif d'alimentation est utilisé pour un même contenant ou si plus d'un contenant est utilisé pour un même dispositif d'alimentation, le temps de suspension sécuritaire est d'un maximum de 24 heures. Suivre le mode d'emploi fourni par le fabricant du dispositif d'alimentation.

12. CHANGER TOUS LES ARTICLES CONNEXES UTILISÉS POUR L'ALIMENTATION (SERINGUES DE RINÇAGE, CAPUCHONS DE PROTECTION, ETC.) AU MOINS TOUTES LES 24 HEURES.

IMPORTANT : Les articles multiusages peuvent être une source de contamination.

RAPPELS

- Lorsque le dispositif d'alimentation est débranché de la sonde d'alimentation, le recouvrir à l'aide du capuchon de protection, afin de réduire le risque de contamination par contact. Ne pas oublier de jeter le capuchon de protection au moment de changer le dispositif d'alimentation.
- Conserver les contenants non ouverts entre 13 et 24 °C dans leur carton d'origine ou dans une armoire fermée, pour les protéger de la lumière directe du soleil.
- S'il y a un risque de contact avec des liquides corporels (p. ex., contenu gastrique) au moment du raccordement du dispositif d'alimentation à la sonde d'alimentation, observer les mesures de précaution universelles.
- Ne jamais ajouter d'autres substances dans le contenant. Elles pourraient interagir avec la préparation, la contaminer ou compromettre l'intégrité du contenant, ce qui réduirait considérablement le temps de suspension sécuritaire.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott ou composez le 1-866-767-7411*.

* Ne vise pas à remplacer les conseils d'un professionnel de la santé.